

# KURZBEDIENUNGS- ANLEITUNG

## Vorbereitung der Pumpe:

Verbinden Sie das Flocare® Infinity Überleitgerät wie auf der Verpackung angegeben mit dem Nahrungsbehälter.



- 1 > Öffnen Sie die Pumpentür, indem Sie auf den Clip (Verschlussklemme) **(A)** der Pumpentür drücken und gleichzeitig die Pumpentür **(B)** nach oben zurückklappen.
- 2 > Positionieren Sie die Schlaufe des Pumpensegments des Überleitgeräts leicht gedehnt um den Rotor.
- 3 > Legen Sie die Schlauchkassette in die Vorrichtung.
- 4 > Schließen Sie die Pumpentür.
- 5 > **Jetzt können Sie die Pumpe einschalten.**

## Kurzbedienungsanleitung:

Volumen löschen und Überleitgerät befüllen

- ON/OFF** > beim Ein- und Ausschalten 2 Sekunden lang gedrückt halten
  - CLR** > verabreichtes Volumen wird auf „0“ gesetzt
  - FILL SET** > durch das Drücken dieser Taste für 2 Sekunden wird das Überleitgerät automatisch befüllt\*
- > Überleitgerät mit der Sonde verbinden. Einstellung **1** oder **2** wählen

**1** Dauertropfapplikation      Display: ml/h >  $\begin{matrix} + \\ - \end{matrix}$  400 ml/h > **START/STOP**  $\begin{matrix} + \\ - \end{matrix}$  1 ml/h

**2** Dauertropfapplikation mit Gesamtvolumenprogrammierung      Display: ml/h >  $\begin{matrix} + \\ - \end{matrix}$  400 ml/h > **DOSE = VOL** >  $\begin{matrix} + \\ - \end{matrix}$  4.000 ml > **START/STOP**  $\begin{matrix} + \\ - \end{matrix}$  1 ml

\* Die „FILL SET“-Funktion sollte nur genutzt werden, um ein leeres (luftbefülltes) Überleitgerät zu befüllen. Die Nutzung der „FILL SET“-Funktion zu einem anderen Zweck kann dazu führen, dass sich die Pumpe falsch kalibriert. Sobald die „FILL SET“-Funktion gestartet wurde, kalibriert sich die Pumpe auf das jeweils eingelegte Überleitgerät.

## KURZBEDIENUNGS- ANLEITUNG

### Auszug aus den Fehlermeldungen:

(bitte beachten Sie die  
ausführliche Bedienungsanleitung)



Fehler	Korrektur
<b>NO SET</b>	> <b>[ON/OFF]</b> für 2 Sekunden drücken, um die Pumpe auszuschalten > Flocare Überleitgerät für Infinity (nochmal korrekt) nach Gebrauchsanleitung einlegen > Pumpe mit <b>[ON/OFF]</b> wieder einschalten > mit Drücken von <b>[START/STOP]</b> wieder starten
<b>PUSH STRT</b>	> die Pumpe ist in Halteposition: 1x <b>[START/STOP]</b> drücken, um Halteposition um 3 Minuten zu verlängern > zum Start der Pumpe <b>[START/STOP]</b> erneut drücken
<b>END OF DOSE</b>	> das Gesamtvolumen ist verabreicht > <b>[START/STOP]</b> drücken > <b>[INFO]</b> drücken und mit <b>[CLR]</b> Daten löschen > <b>[START/STOP]</b> drücken, um Pumpe ggf. wieder zu starten
<b>AIR</b>	> überprüfen Sie, ob das Überleitgerät korrekt eingelegt wurde und der Luftsensord sauber ist > die Luft im Überleitgerät mit <b>[FILL SET]</b> beseitigen
<b>OCC IN</b>	> <b>[START/STOP]</b> drücken > bei <b>[OCC IN]</b> Überleitgerät auf Durchlässigkeit und Kassette auf Sauberkeit überprüfen und ggf. reinigen. Bei <b>[OCC OUT]</b> Sonde auf Durchlässigkeit prüfen > Überleitgerät ggf. wieder einlegen und durch Drücken von <b>[START/STOP]</b> wieder starten
<b>OCC OUT</b>	> Pumpe mit <b>[START/STOP]</b> anhalten, erneut kurz (1 Sekunde) laufen lassen > Pumpe erneut mit <b>[START/STOP]</b> anhalten, bevor die Pumpe in OCC/Air Alarm geht > Überleitgerät entfernen und wieder einlegen > Pumpe wieder starten mit <b>[START/STOP]</b>
<b>OCC OUT</b> <b>AIR</b> (wiederholt)	> Pumpe mit <b>[START/STOP]</b> anhalten, erneut kurz (1 Sekunde) laufen lassen > Pumpe erneut mit <b>[START/STOP]</b> anhalten, bevor die Pumpe in OCC/Air Alarm geht > Überleitgerät entfernen und wieder einlegen > Pumpe wieder starten mit <b>[START/STOP]</b>
<b>ER01 – ER99</b>	> elektronischer Fehler > Pumpe mit <b>[ON/OFF]</b> aus- und wieder einschalten
<b>ERRA – ERRZ</b>	> falls sich diese Fehlermeldung wiederholt > Pumpe in den Service
<b>KEIN-<math>\alpha</math>SYMBOL</b>	> das Ladegerät oder die Steckdose funktioniert nicht
<b>BATT</b>	> Akku schwach > Pumpe über das Netz-/Ladegerät ca. 6 Std. aufladen > die Pumpe kann währenddessen weiterbenutzt werden
<b>DOOR*</b>	> Pumpentür nicht richtig geschlossen > Pumpentür schließen
<b>PROG*</b>	> Dauertropfrate wurde nicht eingestellt > Dauertropfrate einstellen

\* nicht für Seriennummern 76500000 – 76649999



**Hersteller Infinity:**  
 Nutricia Medical Devices b.v.  
 The Netherlands  
[www.nutriciaflocare.com](http://www.nutriciaflocare.com)

**Vertrieb Deutschland:**  
 Nutricia GmbH  
 Postfach 2769  
 D-91015 Erlangen  
 Telefon 09131 7782 0  
 Telefax 09131 7782 10  
[www.nutrison-flocare.de](http://www.nutrison-flocare.de)

**Vertrieb Österreich:**  
 Nutricia GmbH  
 Technologiestraße 10  
 A-1120 Wien  
 Telefon 01 6882626 0  
 Telefax 01 6882626 666  
[www.nutrison-flocare.at](http://www.nutrison-flocare.at)

**Nutricia Schweiz:**  
 Nutricia S.A.  
 Leutschenbachstrasse 95  
 CH-8050 Zürich  
 Telefon 044 543 70 96  
 Telefax 044 543 70 97  
[www.nutrison-flocare.ch](http://www.nutrison-flocare.ch)