




**BOLUSGABE  
SONDEN-  
NAHRUNG  
BEI KINDERN**

# BOLUSGABE SONDENERNÄHRUNG (EINZELPORTIONEN)

SO FÜHREN SIE die Bolusgabe bei Kindern durch

- 1** Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Seife und trocknen Sie sie mit einem sauberen und frisch gewaschenen Handtuch oder Küchenpapier ab oder führen Sie nach Möglichkeit eine **hygienische Händedesinfektion** durch.
- 2** **Schließen** Sie die **Ritsch-Ratsch-Klemme** an der Sonde und **öffnen** Sie den **Sondenkonnektor**.
- 3** Ziehen Sie 20–40 ml **Spülflüssigkeit** auf. **Verschrauben** Sie nun die **ENFit Spritze** mit der **Sonde**.
- 4** **Öffnen** Sie anschließend die **Ritsch-Ratsch-Klemme** an der Sonde und **verabreichen** Sie langsam die Flüssigkeit. Abschließend sollten Sie die **Klemme** wieder **schließen** und die **ENFit Spritze entfernen**.
- 5** Schütteln bzw. **schwenken** Sie die Sondennahrung **vorsichtig**. **Vermeiden** Sie dabei unbedingt eine **Blasenbildung**.
- 6** **Klappen** Sie die Verschlusskappe des SmartPacks **auf** und **verschrauben** Sie den Bolusadapter **mit der Sondennahrung**. Verbinden Sie dafür einfach den plusförmigen Anschluss am Überleitgerät mit dem plusförmigen Anschluss an der Sondennahrung und **durchstoßen** Sie hierbei die **innenliegende Folie**.

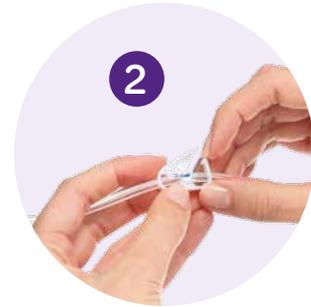

# BOLUSGABE SONDENNÄHRUNG (EINZELPORTIONEN)

SO FÜHREN SIE die Bolusgabe bei Kindern durch

- 7 Ziehen Sie als nächstes mit der **ENFit Spritze** die **Sondennahrung** auf.
- 8 **Verschrauben** Sie nun die **ENFit Spritze** mit dem **Sondenkonnektor**.
- 9 **Öffnen** Sie die **Klemme** und **verabreichen** Sie die Nahrung langsam durch leichten Druck auf den Kolben der ENFit Spritze.
- 10 **Schließen** Sie anschließend die **Klemme** und **entfernen** Sie dann die **ENFit Spritze**. **Wiederholen** Sie den Vorgang so oft, bis die gewünschte Nahrungsmenge verabreicht wurde.
- 11 **Spülen** Sie am Ende mit **20–40 ml Flüssigkeit**.



HIER GEHT'S ZUM VIDEO BOLUSGABE SONDENNÄHRUNG BEI KINDERN  
<https://youtu.be/XhTCGXVJqio>